

Anleitung Sammeln und Verschicken der Schweinekotproben für die parasitologische Diagnostik

Sehr geehrte Schweinehalterin
Sehr geehrter Schweinehalter

Damit wir Ihnen zuverlässige Analysenresultate liefern können, bitten wir Sie, beim Sammeln und Verschicken der Kotproben folgende Punkte zu befolgen:

1. **Anfang Woche** die Probe(n) sammeln.
2. Möglichst frisch abgesetzten Kot von der oberen Hälfte der Kothaufen sammeln (Kot ohne Bodenkontakt). Pro Probe bzw. Tier wird max. ein Probebecher benötigt.
3. Bei Sammelkotproben (6–10 Tiere) von allen Tieren einer Gruppe möglichst gleich viel Kot sammeln, mischen und einen Becher voll einsenden.
Bei grossen Gruppen (> 40 Tiere) von mind. 10% der Tiere. Besser ist es, mehrere Proben pro Gruppe (jeweils 6–10 Tiere / Probe) zu nehmen.
4. Die Probe mit einer Klebeetikette so anschreiben, dass sie klar identifizierbar ist (Datum, Tier/Gruppe und Ihr Name).
5. Angeschriebene Probebecher in verschliessbaren Plastikbeutel geben, diesen in Kühlbox oder Kartonschachtel legen. Die Kotprobe ist nun 3-fach verpackt.
6. Die Probe(n) noch am gleichen Tag mit A-Post an das Labor schicken.

Vielen Dank!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Erika Perler
Labor Nutztierwissenschaften
Tel. +41 62 865 72 26