

Wurmkontrolle bei Legehennen Anleitung zum Einsammeln und Verschicken der Kotproben

Liebe Legehennenhalterin
lieber Legehennenhalter

Für das Sammeln und Verschicken der Kotproben bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu beachten. Das Einhalten des Vorgehens ist für ein zuverlässiges Analyseresultat wesentlich. Handschuh und Plastikbeutel sind beim FiBL Labor erhältlich. Es kann aber auch eigenes Material verwendet werden.

1. Entnehmen Sie **Anfang Woche** zufällig zirka 60 frische Kothäufchen und sammeln Sie diese in einem Gefäss.
2. Ziehen Sie einen Plastikhandschuh an und mischen Sie den Kot mit der behandschuhten Hand gründlich. Greifen Sie danach eine Handvoll (zirka 100 g) Kot.
3. Stülpen Sie den Handschuh um, packen Sie ihn in einen dichten Plastikbeutel und verschliessen diesen. Packen Sie den ersten wiederum in einen zweiten, verschliessbaren Plastikbeutel.
4. Schreiben Sie Ihren Namen und Ort mit einem wasserfesten Stift auf den Plastikbeutel.
5. Legen Sie die dreifach verpackte Kotprobe und das ausgefüllte Untersuchungsformular in das erhaltene Versandkuvert.
6. Schicken Sie die Mischprobe noch am gleichen Tag mit A-Post an das FiBL Labor.

Vielen Dank!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sandra Cvejic
Labor Nutztierwissenschaften
Tel. +41 (0)62 865 63 94
sandra.cvejic@fibl.org