

Instructions pour le prélèvement et l'envoi de fèces Contrôle des vers chez les porcs

Chère éleveuse de porcs
Cher éleveur de porcs

Pour que nous puissions vous fournir des résultats d'analyse fiables, nous vous prions de prêter attention aux points suivants lors de la collecte et de l'envoi des échantillons de fèces:

1. Collecter le(s) échantillon(s) de fèces **en début de semaine**.
2. Collecter si possible les fèces fraîchement déposées dans la moitié supérieure des tas (fèces sans contact avec le sol).
Un gobelet d'échantillon au maximum est nécessaire par échantillon ou animal.
3. Pour les échantillons collectifs (6-10 animaux), collecter autant que possible la même quantité de fèces de tous les animaux d'un groupe, les mélanger et envoyer un gobelet plein.
Pour les grands groupes (> 40 animaux), prélever au moins chez 10% des animaux. Il est préférable de prélever plusieurs échantillons collectifs (6-10 animaux par échantillon collectif) par groupe.
4. Coller une étiquette adhésive sur l'échantillon de manière à ce qu'il soit clairement identifiable (date, animal / groupe et votre nom).
5. Placer les gobelets d'échantillons inscrits dans un sac plastique refermable, puis placer ce dernier dans une glacière ou une boîte en carton. L'échantillon est ainsi triplement emballé.
6. Envoyer le(s) échantillon(s) le jour même par courrier A au laboratoire.

Merci beaucoup!

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Sandra Cvejic
Labor Nutztierwissenschaften
Tél. +41 (0)62 865 63 94
sandra.cvejic@fibl.org